



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060, ABD
Tel: 440-942-6161
Faks: 440-942-2257
E-posta: volk@volk.com

EC REP

AB Temsilcisi:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstra e 31
72417 Jungingen, Almanya
E-posta: info@riester.de
Tel: +49 74 77 / 92 70-0
Faks: +49 74 77 / 92 70-70



Volk Optical Binocular Indirect Ophthalmoscope (BIO) Lensleri

T RK E (TR): KULLANMA KILAVUZU

KULLANIM AMACI

Volk Optical BIO Lensleri, bir binok ler indirekt oftalmoskop kullanılarak insan retinasının (fundusunun) tanısı ve lazer tedavisi sırasında g r nt leme i in tasarlanmı tır.

 ZELLİKLER

�r�n	B�y�tme	G�r�� Alanı	�alı�ma Mesafesi	Lazer Nokta B�y�tme	�ap	Yansımaya �nleyici Lazer Kaplama
Macula Plus� 5.5 (VMP5.5)	5,50	36� - 43�	80 mm (Uzatma olmadan) 39 mm (Uzatma ile birlikte)	0,18	58 mm	BBAR
14D (V14LC)	4,3	36� - 47�	75 mm	0,23	52 mm	BBAR
15D (V15LC)	4,11	36� - 47�	72 mm	0,24	52 mm	BBAR
20D (V20LC)	3,13	46� - 60�	50 mm	0,32	50 mm	BBAR
ClearField Pro (VCFPRO)	2,80	55� - 72�	37 mm	0,36	48 mm	UHE Pro
Pan Retinal� 2.2 (VPRC)	2,68	56� - 73�	40 mm	0,37	53 mm	BBAR
25D (V25LC)	2,54	52� - 68�	38 mm	0,39	45 mm	BBAR
28D (V28LC)	2,27	53� - 69�	33 mm	0,44	41 mm	BBAR
30D (V30LC)	2,15	58� - 75�	30 mm	0,47	43 mm	BBAR
30D Small (V30SC)	2,09	44� - 57�	30 mm	0,48	31 mm	BBAR
40D (V40LC)	1,67	69� - 90�	20 mm	0,60	40 mm	BBAR
Digital ClearField (VDGTLCF)	2,79	55� - 72�	37 mm	0,36	48 mm	UHE
Digital ClearMag (VDGTLCM)	3,89	38� - 49�	60 mm	0,26	48 mm	UHE

KULLANIMA Y NELİK ENDİKASYONLAR

- Di er binok ler indirekt fundus lensleri ile uyumlu bir y ntemle lisanslı bir hekim tarafından kullanılmalıdır.
- Halkanın  zerine i lenmi  "Volk" yazısındaki "V" harfinin tabanı veya halkanın g m   kenarı hastaya bakacak  ekilde lensi y nlendiriniz. ClearField Pro konik ucu hastaya bakacak  ekilde tutulmalıdır. Ardından, yukarıdaki  zellikler tablosunu kullanarak, lensi korneadan uygun  alı ma mesafesine dikkatli  ekilde yerle tirmeniz  nerilir.
- Volk'un BBAR ve UHE Pro Yansımaya  nleyici Lazer Kaplaması g zle g r l r ve yakın kızılı esi dalga boyu lazer prosed rlerinin ( rn., argon & diyet) yanı sıra tanı amaçlı g r nt leme i in optimize edilmi tir.
- Volk'un UHE Yansımaya  nleyici Lazer Kaplaması, yalnızca tanı amaçlı g r nt leme ve g zle g r l r dalga boyu lazer prosed rleri ( rn., argon) i in optimize edilmi tir.
- Retinadaki nokta b y kl  n  hesaplamak, lazer nokta ayarı uygun *Lazer B y tme Fakt r * ile  arpılmalıdır. Kullanmakta oldu unuz lense uygun Lazer B y tme Fakt r n  bulmak i in  zellikler tablosuna bakınız.



DİKKAT:

- HERHANGİ BİR HASAR BELİRTİSİ G STERİYORSA CİHAZI KULLANMAYINIZ.
- CİHAZ İLE İLGİLİ OLARAK MEYDANA GELEN HERHANGİ BİR CİDDİ OLAY,  RETİCİYE VE KULLANICININ VE/VEYA HASTANIN YERLE İK OLDU U  YE DEVLETİN YETKİLİ MAKAMINA BİLDİRİLMELİDİR.

TEKRAR İ LEME



UYARI:

- KAPSAMLI, MANUEL BİR TEMİZLİK İ LEMİ  NERİLİR.
- A INDIRICI TEMİZLEME MADDELERİ (YANİ ASİTLER, ALKALİNLER VB.)  NERİLMEZ. N TR PH İ EREN DETERJANLI TEMİZLİK MADDELERİ  NERİLİR.

TEKRAR İ LEME SINIRLAMALARI:

Talimatlara g re i lendi inde tekrarlı temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyonun Volk Non-Contact BIO Lensleri  zerinde d   k etkisi vardır.  r n n kullanım  mr  sonu normalde kullanımdan kaynaklı a ınmaya ve hasara g re belirlenir.

KULLANMA NOKTASINDA HAZIRLIK:

- Yeni veya kullanılmı  kontamine lensler temizlenmelidir.
- Temizleme  ncesinde v cut sıvılarının cihazın  zerinde kurumasına izin verilmemelidir. Fazla v cut sıvılarını temizleyiniz.
- Kontamine malzemeleri elden ge irmek i in evrensel  nlemlere uyulmalıdır.
- Kirletici maddelerin y zeyde kurumasını en aza indirmek i in kullanım sonrasında m mk n olan en kısa s rede aletler temizlenmelidir.
- Yeni temizlenmi , dezenfekte edilmi  ve/veya sterilize edilmi  bir cihaza kirletici madde girmedikten emin olmak i in cihazlar her zaman uygun bir y ntemle kullanılmalıdır.

TEMİZLEME  NCESİ HAZIRLIK:

Kirletici maddelerin lens y zeyi  zerinde kurumasına izin verilmeyerek a a ıdaki temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon talimatları desteklenir. M mk n oldu unda, lensleri suya koyunuz ya da  zerlerine nemli bir bez  rt n z.

TEMİZLEME, DEZENFEKSİYON, STERİLİZASYON

TEMİZLEME:

İstediu iniz temizleme y ntemini se iniz:

A Y�ntemi:	Hafif bir deterjan ve temiz, yumu�ak pamuklu bir bez veya temizleme �ubu�u ile temizleyiniz. Yuvanın i�indeki tespit halkasının ge�emesini engellemeye yardımcı olmak i�in lens y�zeyini saat y�n�nde temizleyiniz. Yumu�atıcı (nemlendirici) ihtiva eden deterjanlar kullanmayınız.
B Y�ntemi:	Cam elemanını Volk Precision Optical Lens Cleaner (POLC) veya Volk LensPen� ile temizleyiniz. Yuvanın i�indeki tespit halkasının ge�emesini engellemeye yardımcı olmak i�in lens y�zeyini saat y�n�nde temizleyiniz. DİKKAT: G�zle temas eden y�zeyler �zerinde Volk'un POLC veya Volk LensPen� �r�n�n� kullanmayınız.
C Y�ntemi:	- Ilık (~30 - 43�C) musluk suyu kullanarak galon ba�ına 2 ons yeni enzimatik temizleme (�rn., Enzol) s�l�s�n� hazırlayınız. - Her bir cihazı 20 dakika boyunca s�l�syonda bekletiniz. - S�l�syonda beklettikten sonra, temizleme s�l�s�n�n� ve kir izlerinin tamamı �ıkana kadar yumu�ak k�ll� bir fır�a ile cihaz halkasının �zerindeki t�rt�kl� y�zeyi fır�alayınız ve yumu�ak bir bezle lens kısmını siliniz. Lens y�zeyini saat y�n�nde temizleyiniz. T�m aralıklara ve di�er eri�ilmesi zor alanlara �zel dikkat g�steriniz. Not: �izilmeyi �nlemek i�in lens kısmını fır�alamayınız; yumu�ak bir bez kullanınız. - G�zle g�r�l�r temizleme s�l�s�n�n�n tamamı giderilene kadar cihazları oda sıcaklı�ında musluk suyu banyosunda (akan suyun altında de�il) iyice durulayınız. - Cihaz(lar)ı yeni hazırlanmı� enzimatik s�l�syona (yukarıdaki 1 nolu adıma g�re) aktarınız ve 20 dakika boyunca selenleyiniz. - Selenleme sonrasında, g�zle g�r�l�r temizleme s�l�s�n�n�n tamamı giderilene kadar cihaz(lar)ı oda sıcaklı�ında bir musluk suyu banyosunda (akan suyun altında de�il) iyice durulayınız. - Kalan tortular a�ısından her bir cihazı kontrol ediniz. Herhangi bir tortu g�r�lmesi halinde, yeni hazırlanmı� temizleme s�l�s�n�ları ile temizleme prosed�r�n� tekrarlayınız.



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060, ABD
Tel: 440-942-6161
Faks: 440-942-2257
E-posta: volk@volk.com

EC REP

AB Temsilcisi:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Almanya
E-posta: info@riester.de
Tel: +49 74 77 / 92 70-0
Faks: +49 74 77 / 92 70-70



DEZENFEKSİYON:

1. **A Yöntemi** veya **C Yöntemi** temizleme talimatlarını izleyiniz.
2. Aşağıdaki tablodan solüsyon türlerinden **birini** seçiniz:

DEZENFEKTAN	KONSANTRASYON	MINİMUM SOLÜSYONDA BEKLETME SÜRESİ	MAKSİMUM SOLÜSYONDA BEKLETME SÜRESİ
Glutaraldehit	%2 sulu solüsyon	25 dakika	G/D
Sodyum hipoklorit (5000 ppm NaClO)	9 birim su:1 birim çamaşır suyu (%5.25 NaClO)	25 dakika	25 dakika
Cidex OPA	Üretici Talimatlarına bakınız	12 dakika	G/D

3. Lensi yan çeviriniz ve ardından cihazı yukarıda belirtilen minimum solüsyonda bekletme süresi kadar (en az 20°C sıcaklıkta) seçilen dezenfektan solüsyona tamamen daldırınız. Tüm boşlukların, erişilmesi zor alanların dolduğundan emin olunuz ve hava ceplerini gideriniz.
4. Oda sıcaklığında bir su banyosunda (en az 20°C sıcaklıkta) iyice durulayınız. Cihazı en az bir dakika boyunca tamamen daldırarak durulayınız. Elinizle tüm boşlukları veya diğer erişilmesi zor alanları suyla yıkayınız. Cihazı suyun altında çalkalayınız, su seviyesinin üzerine getiriniz, ardından tekrar daldırınız. Temiz su kullanarak durulama prosedürünü iki defa daha tekrarlayınız.
5. Yumuşak, hav bırakmayan pamuklu bir bez ile kurulayınız.



DİKKAT:

1. ÖNERİLEN VEYA İSTENEN SOLÜSYONDA BEKLETME SÜRESİNİN TAMAMI BOYUNCA CİHAZIN DEZENFEKTAN SOLÜSYONUNA TAMAMEN DALDIRILDIĞINDAN EMİN OLUNUZ. CİHAZIN DEZENFEKTAN SOLÜSYONUNDAN ÇIKMASINA İZİN VERMEYİNİZ.
2. SODYUM HİPOKLORİTE UZUN SÜRELİ MARUZİYET VE/VEYA YÜKSEK KONSANTRASYONLARDA MARUZİYET ÜRÜNÜN HIZLI BOZUNMASI İLE SONUÇLANACAKTIR.

STERİLİZASYON:

1. **C Yöntemi** temizleme talimatlarını izleyiniz.
2. Etilen oksit sterilizasyonu tercih edilen sterilizasyon yöntemidir. Önerilen 130°F (en fazla 150°F) sıcaklıkta ve 600 mg/L konsantrasyonda 2 saatlik bir döngü uygulayarak sterilize ediniz.
3. Sterilizasyon sistemlerinde kullanılmaları amaçlanmadığından lensleri standart lens kapları içinde sterilize etmeyiniz.



DİKKAT:

ÜRÜN HASARINDAN KAÇINMAK İÇİN LENSLERİ VEYA ADAPTÖRLERİ ASLA BASINÇLI KABA KOYMAYINIZ YA DA KAYNATMAYINIZ.

SAKLAMA

Cihazlar oda sıcaklığında saklanmalıdır. Steril aletler sterilite kaybından koruma sağlayan bir alanda saklanmalıdır.

CİHAZIN BERTARAFI

Bu ürünün yasaya aykırı şekilde bertarafının insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Lensi ayrılmamış belediye atığı olarak bertaraf etmeyiniz. Bu ürünü bertaraf ederken, lütfen bölgenizde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olan prosedürü izleyiniz.



Önemli uyarı niteliğindeki bilgiler için Kullanma Kılavuzuna başvurunuz



Parti numarası



Referans numarası



Üretici



Avrupa Birliği'ndeki yetkili temsilci



Üretim Tarihi



Tıbbi Cihaz