




Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tlf.: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
E-mail: volk@volk.com



EU-repræsentant:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Tyskland
E-mail: info@riester.de
Tlf.: +49 74 77 / 92 70-0
Fax: +49 74 77 / 92 70-70

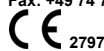

Volk®1 Indirekte Vitrektomi-linse Til Engangsbrug Med Bredt Felt

- STERIL. STERILISERET MED ETHYLENOXID.
- KUN TIL ENGANGSBRUG.
- MÅ IKKE BRUGES, HVIS PAKKEN ER ÅBEN ELLER BESKADIGET.
- FØDERAL LOVGIVNING (USA) BEGRÆNSER DETTE UDSYR TIL SALG VED ELLER EFTER LÆGEORDINATION.

DANSK (DA): BRUGSANVISNING

INDIKATIONER FOR ANVENDELSE

Volk®1 Single Use Indirect Wide Field Vitrectomy Lens er beregnet til brug som en diagnostisk linse til fundusundersøgelser og til behandling af intraokulære abnormiteter. Anordningerne er sterile engangslinse-systemer.

SPECIFIKATIONER

Produkt	Produktkode	Forstørrelse	Synsfelt
Volk®1 Indirekte Vitrektomi-linse til Engangsbrug med Bredt Synsfelt og Håndtag	VVITSSVDH	0,55x	106°



ADVARSLER

1. Nedsenk ikke enheden i et dekontaminerende produkt før brug. Spray ikke enheden med væske før eller under brug.
2. Undersøg enheden for at sikre, at den ikke er beskadiget (f.eks. skår, ridser osv.). Brug eller reparer ikke enheden, hvis den er beskadiget.
3. Undersøg kontaktfladen eller -fladerne for at sikre, at den ikke er beskadiget (f.eks. skår, ridser osv.). Brug eller reparer ikke enheden, hvis den er beskadiget.
4. ENHVER ALVORLIG HÆNDELSE, DER ER SKET I FORBINDELSE MED UDSYRET, SKAL INDBERETTES TIL FABRIKANTEN OG DEN KOMPETENTE MYNDIGHED I DET MEDLEMSLAND, HVOR BRUGEREN OG/ELLER PATIENTEN ER ETABLERET.



FORHOLDSREGLER


1. Forsøg ikke at bruge Volk®1 Single Use Indirect Wide Field Vitrectomy Lens, før du har læst og forstået denne brugsanvisning fuldt ud.
2. Anvendes af en autoriseret læge på samme måde som andre oftalmiske vitrektomi-linser med indirekte billede.
3. Den sterile emballage og linsen skal inspiceres før brug. Brug ikke enheden, hvis emballagen er åben eller beskadiget, herunder huller, beskadiget forsejling, løse komponenter eller partikler inde i posen..
4. Volk®1 Indirekte Wide Field Vitrectomy-linse til engangsbrug er kun beregnet til brug på en enkelt patient.
5. Bøj VVITSSVDH-håndtaget til din foretrukne vinkel, før du sætter linsen på hornhinden. Bøj ikke håndtaget mere end 5 gange. Bøj ikke håndtaget mere end 20° fra lodret. Drej ikke håndtaget.
6. Må ikke resteriliseres og genbruges.
7. Denne enhed er pakket og steriliseret til engangsbrug. Må ikke genbruges, oparbejdes eller resteriliseres. Genbrug, oparbejdning eller resterilisering kan skabe risiko for kontaminering og/eller forårsage patientinfektion eller krydsinfektion, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af infektionssygdomme fra en patient til en anden. Kontaminering af enheden kan føre til skade, sygdom eller død hos patienten.

UDLØBSDATO

Brug enheden før udløbsdatoen på pakkens etiket.

ANBEFALEDE ANVISNINGER TIL BRUGEN

1. Tag linsen ud af emballagen, og anbring den i et sterilt arbejdsområde.
2. Alle linsedesigns kræver, at methylcellulose eller en lignende tyktflydende interfaceopløsning påføres den konkave kontaktfælde (dvs. mellem hornhinden og apparatet).
3. VVITSSVDH-håndtaget er valgfrit at bruge. For at samle linsen og håndtaget skal du holde objektivet i bunden af den sorte linsesring. Hold linsen og håndtaget parallelt. Skub håndtagsklemmen rundt om den øverste skulpterede kant på den sorte linsering.

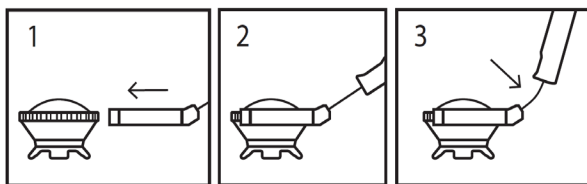

4. Volk®1 Single Use Indirect Wide Field Vitrectomy Lens er en kirurgisk linse, der placeres på hornhinden og hjælper med at forbedre nøjagtigheden og klarheden af billeder af den bageste og perifere nethinde og af glaslegemet under kirurgiske indgreb.

OPBEVARING

Udstyr skal opbevares ved stuetemperatur. Sterile instrumenter skal opbevares i et område, der beskytter mod tab af sterilitet.

BORTSKAFFELSE AF UDSYR

Ulovlig bortskaffelse af dette produkt kan have en negativ indvirkning på menneskers sundhed og på miljøet. Linsen må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Når du bortskaffer dette produkt, skal du følge den procedure, der er i overensstemmelse med de love og regler, der gælder for dit område.



Steriliseret ved hjælp af ethylenoxid



Må ikke genbruges



Se brugsanvisning for vigtige advarsler.



Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget eller åben



Udløbsdato



Partiets nummer



Referencenummer



Producent



Bemyndiget repræsentant i Den Europæiske Union



Medicinsk udstyr